

TRANSPORTER SCHODOWY DRAGON DW-ST003

– krzesło ewakuacyjne

INSTRUKCJA OBSŁUGI



POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Celem wyposażenia obiektu w krzesło ewakuacyjne jest umożliwienie sprawniejszej ewakuacji osoby o ograniczonej zdolności poruszania się w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
2. Krzesło ewakuacyjne znajduje się na drugim piętrze budynku w głównej klatce schodowej.

§2


1. Krzesła może użyć każdy kto dysponuje warunkami fizycznymi pozwalającymi bezpiecznie użyć krzesła oraz zapoznała się i postępuje zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Zalecane jest, aby osoba obsługująca krzesło ewakuacyjne została wcześniej przeszkolona w zakresie bezpiecznych i skutecznych technik ewakuacji. Techniki ładowania, w przypadku wyjątkowo ciężkich osób, nierównego terenu lub nietypowych sytuacji, mogą wymagać większej sprawności fizycznej.
3. Osoba ewakuująca osobę o ograniczonej zdolności poruszania się, w wypadku ewakuacji budynku musi:
 - A. W nagłych wypadkach reagować spokojnie.
 - B. Przygotować nosze schodowe do użycia.
 - C. Wspierać i udzielać pomocy osobie ewakuowanej aż do momentu przyjazdu służb ratowniczych lub innych osób odpowiedzialnych.
 - D. Opuścić budynek szybko i bezpiecznie.

PRZYGOTOWANIE KRZESŁA DO UŻYCIA

§3

1. **W CELU UŻYCIA KRZESŁA EWAKUACYJNEGO:**
 - A. Wyjmij krzesło z naściennego mocowania.
 - B. Rozepnij pas spinający.



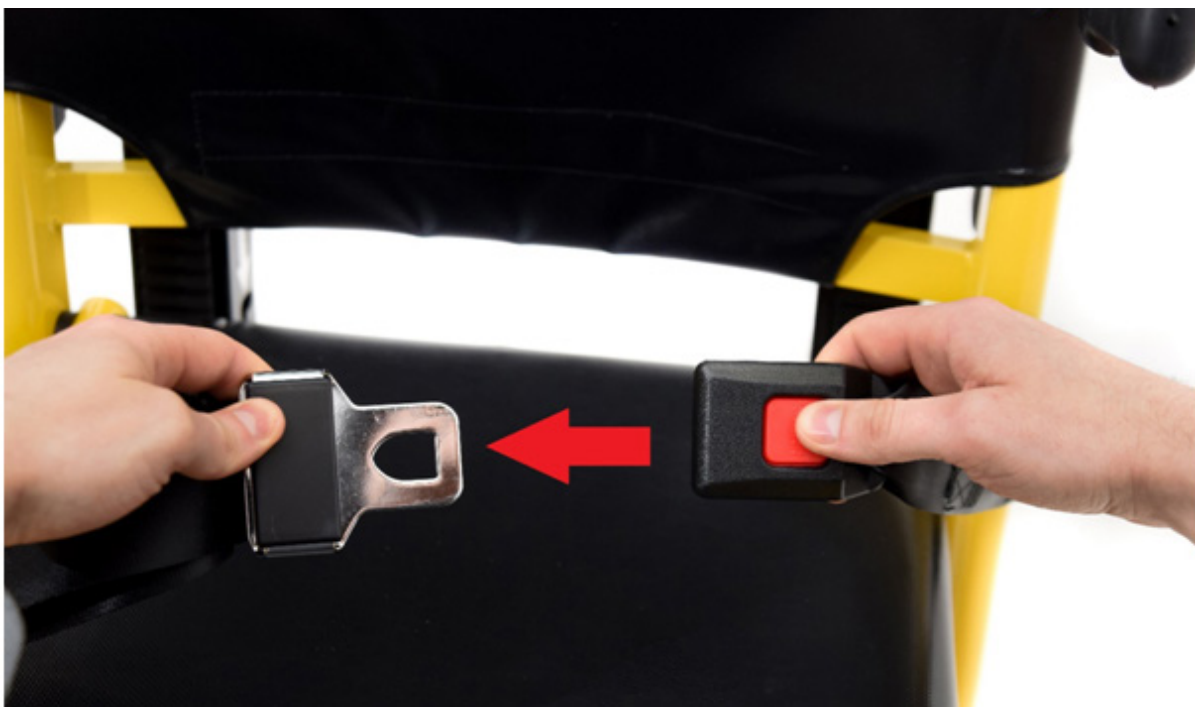

- C. Rozłóż krzesło na płaskiej powierzchni za pomocą czerwonej dźwigni pod siedziskiem (oznaczoną czerwoną strzałką).



2. Przed zastosowaniem sprawdź:

- A. Ogólną funkcjonalność urządzenia.
- B. Mocowanie nakrętek i śrub.
- C. Stan kół i układu hamulcowego.
- D. Stan gąsienic.
- E. Stan pasów bezpieczeństwa, siedziska i zagłówka.

3. Jeśli ocena stanu krzesła ewakuacyjnego opisana w§ 3 pkt.2 jest pozytywna można uznać urządzenie gotowe do użycia.

UŻYWANIE KRZESŁA EWAKUACYJNEGO

§4

1. EWAKUACJA PO PŁASKIEJ POWIERZCHNI.

W celu ewakuacji osoby po powierzchni płaskiej po podstawowym rozłożeniu siedziska i postawieniu urządzenia na płaskiej powierzchni należy:

- A. przygotować krzesło do użycia,
- B. zablokować hamulcem tylne koła,



- C. opuścić podłokietniki dla osoby transportowanej,



D. wysunąć odpowiednio dużo górny uchwyt prowadzący czerwoną dźwignią,



E. przygotować zagłówek do oparcia głowy osoby transportowanej,




F. opuścić podnóżek w dół,



G. posadzić osobę na siedzisku,

H. przypiąć osobę pasem bezpieczeństwa.

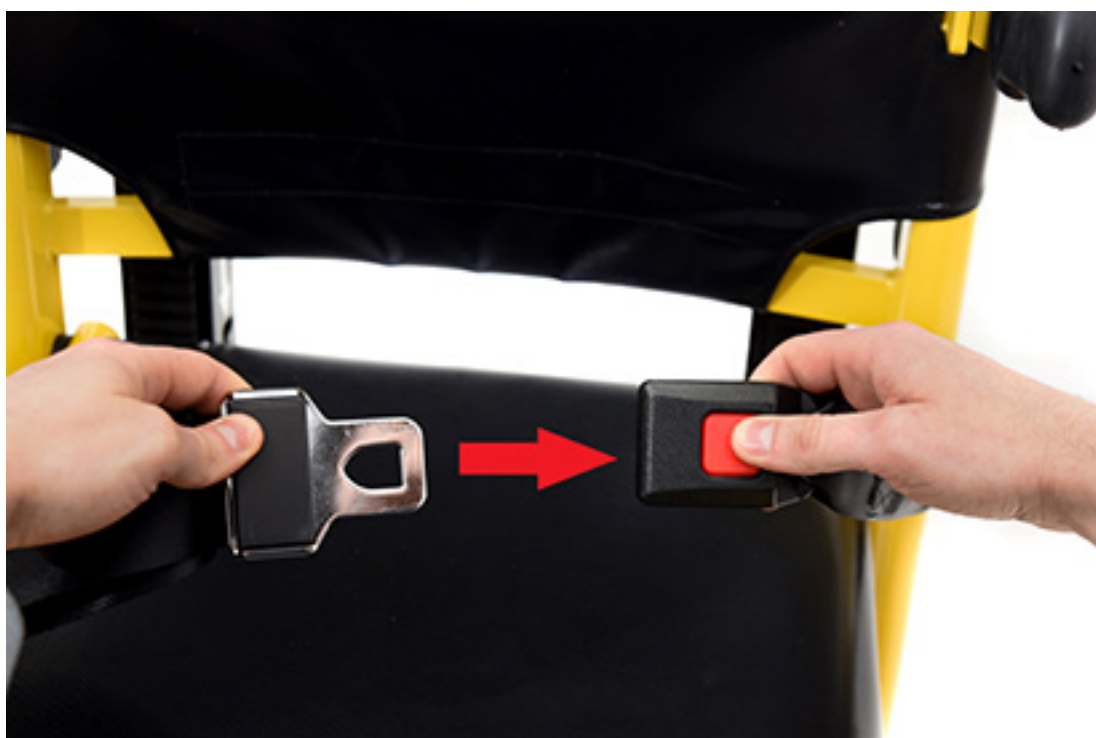

- I. Jeśli osoba jest nieprzytomna lub ma problemy motoryczne istnieje możliwość dodatkowego unieruchomienia głowy pasem (przy głównym uchwycie prowadzącym) oraz tułowia lub nóg (dodatkowym pasem zabezpieczającym).



2. EWAKUACJA PO SCHODACH.

W celu ewakuacji osoby po powierzchni pochyłej (schody) należy:

- A. przygotuj krzesło do użycia,
- B. rozłóż gąsienicę tylną dźwignią na pozycję drugą oznaczoną białą strzałką (dot. schodów ul. Stokłosy 3),



C. po podejściu do krawędzi schodów odchył krzesło w przeciwnym do zejścia kierunku,



D. rozpocznij ruch w przód tak, aby gąsienica znalazła się na pierwszym stopniu,



E. zjeżdżając asekuruj cały czas krzesło.

3. W celu asekuracji osoby ewakuującej po powierzchni pochyłej należy wysunąć uchwyty znajdujące się przy podnóżku. Korzystanie przez drugą osobę z wysuniętych uchwytów ułatwia znacząco ewakuację, dlatego jest zalecana.





4. Jeśli zajdzie taka potrzeba ewakuacja może odbywać się z pominięciem korzystania z gąsienicy i kół urządzenia. W tym celu można wykorzystać uchwyty zarówno przednie jak i tylne. Do tego rodzaju przemieszczania się niezbędne są dwie sprawne fizycznie osoby.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

§5

1. Specyfikacja Techniczna

Kolor	Żółto-czarny
Rozmiar toru	125/75 mm
Rozmiar produktu	105x66 cm
Zamknięty rozmiar	105x55x28 cm
Waga netto	18 kg
Waga Brutto	35 kg
Nośność	160 kg



POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§6

1. Krzesło ewakuacyjne służy do usprawnienia ewakuacji osób które nie są w stanie poruszać się po schodach samodzielnie w wypadku braku możliwości skorzystania z windy.
2. Nieuzasadnione wykorzystywanie krzesła ewakuacyjnego lub wykorzystywanie go w innym celu niż jest przeznaczone może skutkować karami zgodnie z decyzją Rektora Uczelni.
3. Za ewakuację studentów, słuchaczy i uczestników szkoleń odpowiadają nauczyciele/ prowadzący grupy w której występuje osoba o ograniczonej zdolności poruszania się.
4. Za ewakuację pracowników z ograniczoną zdolnością poruszania się odpowiadają kierownicy działów.



Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Studia globalnych możliwości



vistula.edu.pl
vistulahospitality.edu.pl